

nexkin

DSPT



INNOPRICK S.L.
Paseo Mikeletegi 83
20009 San Sebastian
SPANIEN

Tlf.: +34 943 125 197
www.nexkinmedical.com



Pakken indeholder følgende genstande:



- Nexkin DSPT
- Strømforsyning i klasse I til sundhedsfaglig brug
- Strømforsyningskabel
- Brugsanvisning til udstyret

Den indeholder ikke den tablet, der skal bruges til den grafiske brugergrænseflade (GUI).

Det tekniske indhold og udformningen af denne brugsanvisning kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten. Den nyeste udgave af brugsanvisningen kan findes på: www.nexkinmedical.com/downloads

Figur 1.

Patientens side

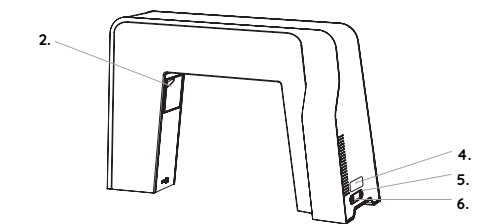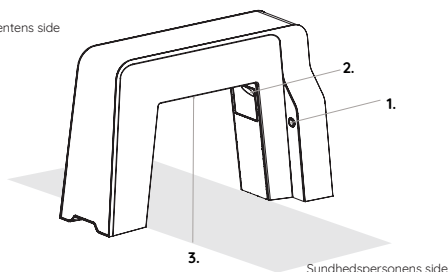

1. Tænd/sluk- knap.
2. Rude i siden.
3. Øverste rude.

4. Produktmærkat.
5. Strømforsyningsstik.
6. RJ45-port (ethernet)

1. TILSIGTET BRUG

Nexkin DSPT bruges som hjælp til påvisning af hævelser og måling ved aflæsning af hudallergitest.

2. BESKRIVELSE AF UDSTYRET

Automatiserer og digitaliserer aflæsninger af hudallergitest og giver resultaterne i digitalt format.

Udstyret må kun bruges af kvalificeret sundhedspersonale ved en medicinsk konsultation (i et sundhedsfagligt miljø ved almindelige omgivende forhold).

Udstyret kan bruges til børn, unge, voksne og ældre, uanset køn eller race.

3. BRUGSANVISNING

3.1 TILSLUTNING AF UDSTYRET

- 1 Anbring udstyret på en sådan måde, at det har den korrekte afstand til patienten.
- 2 Tilslut først strømforsyningen til udstyret og derefter til lysnettet.

3.2 DOWNLOAD OG INSTALLER DEN GRAFISKE BRUGERGRÆNSEFLADE

Download og installer Nexkin appen.



Nexkin appen kan downloades fra:



3.3 SÅDAN LINKES TABLETTE TIL UDSTYRET

- 1 Gå til Settings > Wi-Fi (Indstillinger > Wi-fi) (iOS) eller Settings > Connections > Wi-Fi (Indstillinger > Forbindelser > Wi-fi) (Android).
- 2 Aktiver wi-fi.
- 3 Vælg SSID'et (navnet på wi-fi-netværket), der er vist på mærkaten på udstyret. Hvis wi-fi-netværket ikke vises, så kontroller, at Nexkin DSPT er tændt, og at tabletten er placeret i nærheden af den.



- 4 Indtast adgangskoden til netværket (WIFI KEY), der er vist på mærkaten på udstyret. Tryk på "OK". Hvis du ikke kan trykke på "OK", har du indtastet en forkert adgangskode.

3.4 SÅDAN BRUGES UDSTYRET


- 1 Tænd udstyret.
- 2 Kontroller, at udstyret er forbundet til wi-fi.
- 3 Start den grafiske brugergrænseflade (app'en) på tabletten, så du kan interagere med udstyret.
- 4 Konfigurer og/eller bekræft den test, der skal foretages. Du kan vælge mellem en priktest og en intraadermal test.
- 5 Følg trinene i den grafiske brugergrænseflade (app'en).

For yderligere oplysninger om den grafiske brugergrænseflade henvises til app'en. Kontakt fabrikanten, hvis der er noget, du er i tvivl om.

3.5 SÅDAN OPNÅS EN KORREKT AFLÆSNING


Figur 2.

Hånden skal være afslappet, og armen må ikke bevæges under testen

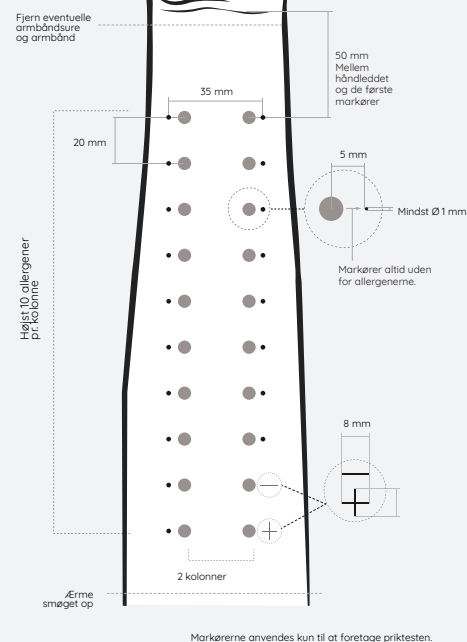


- 1 Armen skal være godt udstrakt og vinkelret i forhold til udstyret.
- 2 Lysstrålen skal være fokuseret mellem allergenerne, som vist på figur 4.
- 3 Bevæg ikke udstyret, mens der aflæses.

Figur 3.

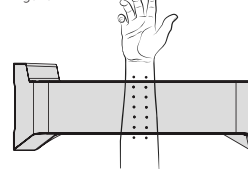

Figur 4.

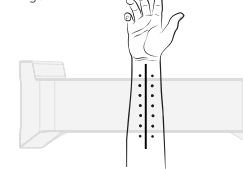

3.6 SÅDAN SLUKKES UDSTYRET

Vælg "Turn off device" (Sluk udstyret) i menuen i den grafiske brugergrænseflade (app'en).

4. RENGØRING OG DESINFEKTION

Sørg for, at udstyret er afbrudt fra lysnettet, inden det rengøres.

Udstyret eller kablerne må ikke nedsænkes i væske eller gøres synligt våde.

Brug ikke skuremidler til rengøring af det medicinske udstyr.

Brug en klud, der er fugtet med vand, til at rengøre udstyrets yderside. Du kan også bruge renseservietter.

Rør ikke den øverste rude, hvor laserlyset udsendes, eller ruderne i siden, hvor kameraerne er placeret, med bare hænder.

5. ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Dette udstyr er ikke beregnet til diagnosticering eller behandling af nogen art og er ikke en erstatning for forsvarlig medicinsk dømmekraft.

Kontakt fabrikanten i tilfælde af problemer eller uventede hændelser under betjening af udstyret.

Enhver alvorlig hændelse, der er sket for brugeren og/eller patienten i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat (for Europa) eller den relevante myndighed (for andre lande), hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Dette udstyr anvender en klasse 2-laser i henhold til standarden IEC 60825-1. Denne laser er sikker for personer med normal blinkerefleks, da denne refleks begrænser utilsigtet eksponering og forhindrer øjenskader. Undgå dog direkte øjenkontakt, og undlad at stirre på lyset i længere perioder.

Udstyret må ikke udsættes for regn eller fugt.

6. KONTRAIKATIONER

For at sikre at udstyret overholder det tilsigtede formål korrekt, skal der tages højde for kontraindikationerne ved hudallergitest. Disse test skal foretages på rask hud på patienter, som ikke har følgende: ar, mellemstore eller store tatoveringer, som dækker hele eller det meste af underarmen, aktiv nældefeber, svær atopisk dermatitis eller intens dermatografisk urticaria. Patienterne må desuden ikke være i behandling med lægemidler, som kan påvirke hudtesten.

7. SYMBOLFORKLARING

	Fabrikant		Skræbøl. Håndteres forsigtigt
	Forsigtig		Opbevares tørt
	Læs brugsanvisningen grundigt før brug af dette udstyr.		Temperaturinterval ved opbevaring
	Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)		Luffugtighedsinterval ved opbevaring
	Serienummer		Laserstråling
	CE-mærke		"ON/OFF" (tænd/sluk)
	Medicinsk udstyr		Modelnummer
	Unik udstyrsidentifikation		Kun til sundhedsfaglig brug (kun USA)

